


fNIRS 装置 Spectratech OEG シリーズ 動画記録機能オプション




メイン画面の Video/Play ボタンをクリックすると左図のビデオ録画・再生窓が現れます。

ここで Video/Play ボタンをクリックすると動画録画・再生が開始され、メイン画面上のヘモグロビン変化信号上には同時刻を示す縦線が現れます。

早送り、コマ送り、一時停止、表示サイズ変更ボタンなどが準備されていますのでご利用ください。

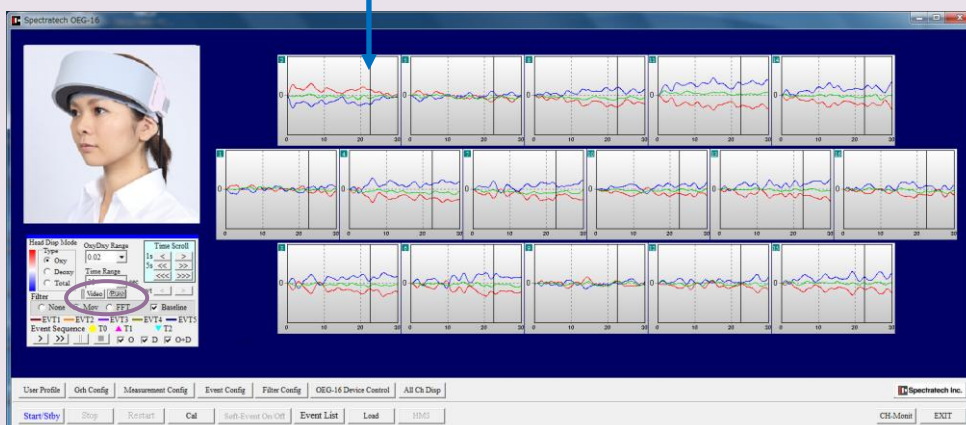

◆接続方法

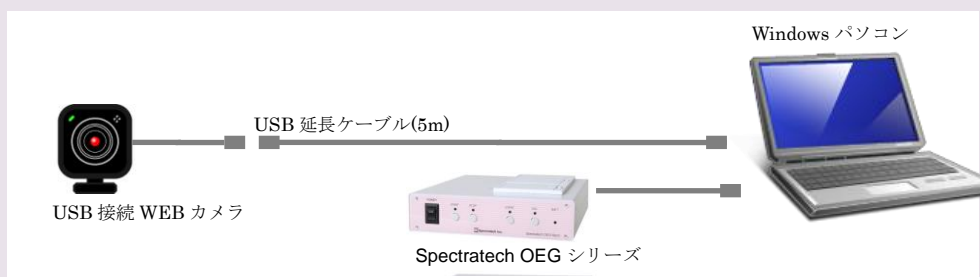

同梱包の USB 接続カメラを、同じく同梱包の USB 延長ケーブル(5m)を経由して、OEG-アプリケーションが稼働している Windows パソコンの空いている USB 端子に接続してください。当 USB カメラは Windows の標準デバイスですのでデバイスドライバのインストールは必要ありません。当カメラを USB 端子に接続すれば自動的に認識されます。

◆製品型番

Spectratech OEG-17APD シリーズ用	Spectratech OEG-17APD-VIDEO-01
Spectratech OEG-SpO2 用	Spectratech OEG-SpO2-VIDEO-01
Spectratech OEG-16 用	Spectratech OEG-16-VIDEO-01

◆構成

動画記録機能オプションは下記から構成されています。

USB 接続 WEB カメラ	1 台
USB 延長ケーブル (5m)	1 本
動画記録機能オプションソフトウェア CD-ROM	1 個
取扱説明書	1 冊

◆動作環境

本ソフトウェアは Microsoft 社の Windows7, Windows8 あるいは Windows10 が搭載され、USB 規格の接続ポートを 2 口以上持つ解像度 1368x768 以上のパソコンでご利用いただけます。パソコンの性能は、CPU が Intel I5 以上でメインメモリーが 4GB 以上のものをお選びください。

- ・記録される動画ファイルは多量にハードディスクの容量を消費します。長時間の記録を行う場合は、ハードディスクの容量を確認してから記録操作を行ってください。
目安：約 3 分間の動画記録で約 10MByte 消費します。
- ・同梱カメラ以外のカメラでの録画・再生はサポート対象外となります。

◆価格 10 万円（消費税別）

 **Spectratech Inc.**

株式会社スペクトラテック

本社 〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 4-2-3
営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-3-10 新横浜 I.O ビル 3 階
電話： 045-471-4893 ファックス： 045-471-4894

取扱店